

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 医療用スポンジ JMDN コード：13695000

再使用禁止

ロートアイドレイン

【禁忌・禁止】


〈使用方法〉

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

眼の各組織上の水分や体液等を吸収する細長いスポンジに、吸水した液体を受水する袋が付いている。

〈形状〉（単位：mm 受水袋 80mL）

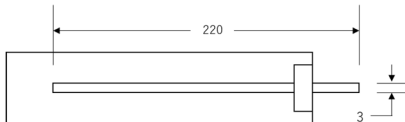

〈原材料〉

スポンジ：ポリビニルアセタール
袋：ポリエチレン

〈原理〉

吸水スポンジが水分や体液等を吸収、除去し、吸収した液体を袋が受水する。

【使用目的又は効果】

眼科手術・処置の際、眼の各組織上の水分や体液等を吸収し、除去する。

【使用方法等】

眼科手術・処置の際、事前に生理食塩水や精製水等の液体でスポンジ部分を十分に湿らせ、眼の各組織に当て吸水等を行い、吸水した液体をポリエチレン袋内に受水させる。

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

- スポンジは、乾燥した状態で使用しないこと。[組織を傷つけるおそれがある。]
- スポンジは、術中、眼の近くで切らないこと。[欠片が患者の創口に入り、異物反応を引き起こすおそれがある。]

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

本品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

- 水濡れ及び直射日光を避け、涼しく乾燥した場所で保管すること。
- 包装に傷を付けたり、ピンホールを生じさせたりしないように保管すること。

〈有効期間〉

包装に記載 [自己認証（当社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売業者〉

ロートニッテン株式会社
〒457-0038 名古屋市南区桜本町 40 番地の 2
TEL：052-822-5512（代表）

〈製造業者〉

セネフォーム社（Cenefom Corporation）
国名：台湾